

アポカインインジェクターを使用される方へ

使用時のエラー表示に関するお知らせ

直射光及び強い光の影響により、

「薬を認識できません」や「直射光を避けて下さい」

のエラーが表示されることがあります。

これらのエラーが表示された場合は、比較的光が強くあたる「明るい窓の近く」や「スポットライト等の強い照明」が本体に直接当たらない場所で再操作してください。

それでもエラーメッセージが表示される場合には、カートリッジに汚れがないかを確認してください。汚れがある場合には、汚れを拭き取ってから再度取り付け、再操作してください。