

－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。－

取扱い上の注意のお知らせ

機械器具 74 医薬品注入器
管理医療機器 医薬品・ワクチン用注入器 JMDN コード 12504002

アポカイン[®]インジェクター

この度、標記製品の取扱い上の注意の情報を記載しております。
ご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

製剤の認識に関するエラー表示について

直射光及び強い光の影響により、
「薬を認識できません」や「直射光を避けて下さい」
のエラーが表示されることがあります。

これらのエラーが表示された場合は、インジェクター本体に強い光が当たることが原因と考えられますので、まず、比較的光が強くあたる「明るい窓の近く」や「スポットライト等の強い照明」等の場所で操作していないかをご確認ください。そのような場所で操作している場合には、本体に直接当たらない場所で操作するようご指導ください。また、屋外では日陰であっても光の影響を強く受ける場合がありますので、同様にご指導ください。

それでもエラーメッセージが表示される場合には、カートリッジ側の原因でインジェクター本体が正しく認識できない可能性もありますので、使用中のカートリッジの外観をチェックし、汚れ等がないかをご確認ください。カートリッジに汚れ等がある場合には、汚れを十分に拭き取ってから再度取り付け、再操作するようご指導ください。

*「アポカインインジェクター使い方ガイド」の表示内容一覧(p26)をご参照ください。

アポカインインジェクターを使用される方へ

使用時のエラー表示に関するお知らせ

直射光及び強い光の影響により、

「薬を認識できません」や「直射光を避けて下さい」

のエラーが表示されることがあります。

これらのエラーが表示された場合は、比較的光が強くあたる「明るい窓の近く」や「スポットライト等の強い照明」が本体に直接当たらない場所で再操作してください。

それでもエラーメッセージが表示される場合には、カートリッジに汚れがないかを確認してください。汚れがある場合には、汚れを拭き取ってから再度取り付け、再操作してください。