

イバン®注0.1%・0.3%・0.6%シリンジ/ドブポン®注0.1%・0.3%・0.6%シリンジ 適合シリンジポンプ一覧

必ず適合が確認されている下記シリンジポンプのみを用いてご使用ください。

- 【注意①】** シリンジポンプを使用するには、シリンジポンプのシリンジメーカーの設定が「テルモ」である事を必ずご確認ください。ただし、大研医器株式会社製シリンジポンプをご使用の際は、下記の注意が必要です。
- 【注意②】** 1mL/hr未満の流量では、±3%以内の流量精度が保証されていませんので、1mL/hr未満で投与する場合には、各シリンジポンプメーカーにお問い合わせください。
- 【注意③】** 本剤のシリンジ容器は、医薬品容器としての役割を果たすため、ディスポーザブルシリンジと比較して摺動抵抗が高い傾向があります。
そのため、シリンジポンプの閉塞検出圧を低めに設定している場合、閉塞警報が発生しやすい傾向があります。
- 【注意④】** ご使用にあたっては、各機種種の取扱説明書に記載の警告・注意点をご確認ください。

適合が確認されているシリンジポンプ(2015年12月現在)

| 製造販売元(販売元) | 機種型番 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| テルモ株式会社 | テルフュージョン®シリンジポンプ TE-331S / TE-332S / TE-351 / TE-352 / TE-SS(TE-SS702N、TE-SS800N) |
| | テルフュージョン®TCIポンプ TE-371 |
| アトムメディカル株式会社 | 1235N / S-1235 |
| 株式会社ジェイ・エム・エス | SP-115 / SP-120 / SP-520 |
| ニプロ株式会社 | SP-80s / SP-80Ws / SP-80Bs |
| 株式会社トップ | TOP-5500 / TOP-5510 / TOP-5520 |

適合は確認されているが、 使用にあたっては注意を必要とするシリンジポンプ(2015年12月現在)

下記のシリンジポンプでのご使用にあたっては、上記の【注意①～④】に加えて、以下の注意が必要です。
詳しくは各シリンジポンプメーカーへお問い合わせください。

| 製造販売元(販売元) | 機種型番 | 注 意 |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 株式会社ジェイ・エム・エス | SP-505 | 終了警報発報前に閉塞警報にて終了する可能性があります。 |
| | SP-505 タイプD | |
| | SP-505D | |
| 株式会社トップ | TOP-5300 | 流量精度±3%(総輸液量3mL以上輸液するとき) |
| 大研医器株式会社 | CSP-100s | 「イノバン注シリンジ・ドブポン注シリンジ専用モード(PFS2)」設定でご使用ください。 「テルモ」設定でも使用可能ですが、閉塞警報が早まる可能性や薬液残量警報が遅れる可能性があります。 |
| | CSP-110 | |

***補足注意事項：本シリンジを極端な陰圧が発生する回路には使用しないこと。**

[解説] ガスケットから押し接続用部品、押し接続用部品から押しが外れたり、シリンジポンプのスライダのフックからシリンジの押しが外れ、急速注入されることがあります。

本一覧は、シリンジポンプメーカー各社からの評価報告をもとに作成しました。